




13 Slik kobler du FreeStyle LibreLink app til diasend® – Enkel synkronisering av FreeStyle LibreLink-dataene i din diasend®-konto (*Foreløpig kun tilgjengelig utenfor USA*)



Krav:

- en diasend® Personal-konto – GRATIS for pasienter!
- en Android-telefon eller iPhone og LibreLink-appen.

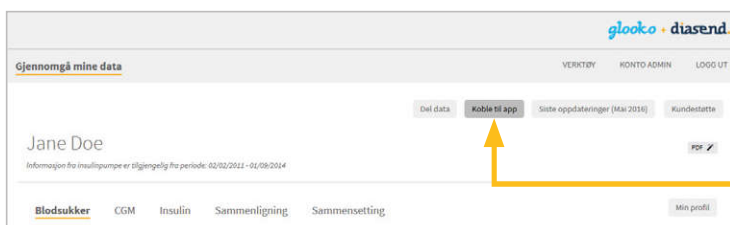


- 1 Logg på din diasend® Personal-konto på www.diasend.com og synkroniser dine FreeStyle Libre-data med diasend® ved å klikke på **koble til app**-knappen.

Koble til app



- 2 Klikk på **koble til**-koblingen for Abbott FreeStyle LibreLink.

Koble til

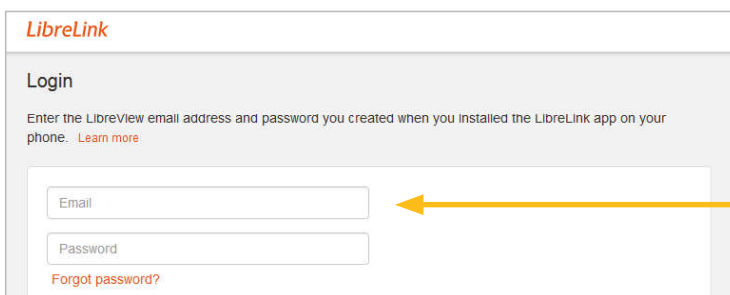

- 3 Angi **LibreView -påloggingsinformasjon** for å godkjenne og legge FreeStyle LibreLink-appen til diasend® Personal-kontoen din. Du er klar til å laste opp data straks du har fullført trinn 1-3.



- 4 Start FreeStyle LibreLink-appen på din Android-telefon eller iPhone, og bruk den til å **skanne** din FreeStyle Libre-sensor.

Dataene på telefonen din vil nå **vises** i diasend® Personal-kontoen din og kan lett **deles** med klinikken din. Fra nå av legges data til hver gang du skanner sensoren med din Android-telefon eller iPhone.

Merk

Hvis du ikke har en Android-telefon eller iPhone, kan du laste opp data til diasend® med FreeStyle Libre-leseren din. Du kan da lett bruke diasend® Uploader-programvaren på datamaskinen og koble FreeStyle Libre-leseren til datamaskinen med en mikro-USB-kabel. Hvis du har andre enheter koblet til din diasend®-konto, vises FreeStyle Libre-data sammen med informasjon fra ekstra enheter. LibreLink er en mobilapplikasjon som er utviklet og levert av Abbott. Bruk av FreeStyle LibreLink krever registrering med LibreView, en tjeneste levert av Abbott. FreeStyle LibreLink-appen er kompatibel med NFC-aktiverte smarttelefoner som kjører Android OS 5.0, eller iPhone 7 med iOS 11 – eller senere. Alle varemerker i dette flygebladet tilhører de respektive eierne.